

**Bedienungsanleitung
für Uni-Flex-Schalen**

Nur in Verbindung mit unseren
Lagerungs- und Positionierungshilfen MALTA und
KRETA
Stand 01/2019

Enste PhysioForm Reha GmbH

Saarlandstraße 91
55411 Bingen
Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail
info@enste-reha.de . www.enste-reha.de



Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen durch den Kauf einer Uni-Flex-Schale.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise
aufmerksam durch.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung
bei dem Produkt verbleibt

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme einer Uni-Flex-Schale:

Die Uni-Flex-Schale wird in einer Größe geliefert und eignet sich durch ihre Verstellmöglichkeiten für
alle Größen unserer Lagerungshilfen MALTA und KRETA.
Jede Uni-Flex-Schale wird zusammengerollt geliefert. Nach Öffnen des umlaufenden Gurtes rollt sich
die Uni-Flex-Schale auf und kann aufgestellt und in Betrieb genommen werden.
Je nach beabsichtigtem Einsatz einer MALTA- oder KRETA-Lagerungshilfe (Sitz- oder Liegeposition)
kann die Uni-Flex-Schale im Durchmesser in 4 Stufen eingestellt werden.
Wenn eine Uni-Flex-Schale eingesetzt wird, ist auf Einhaltung der Symmetrie zu achten. D.h., dass
der umlaufende 27 cm breite Rand einer aufgestellten Lagerungshilfe MALTA oder KRETA mittig zur
Symmetrieachse der Flex-Schale verläuft. Der Rand einer Lagerungshilfe verläuft dementsprechend
senkrecht entlang der Mitte der Uni-Flex-Schale von oben hinten nach unten vorne.
Dies ist besonders zu beachten für den Fall, dass ein Becken- oder Tischpolster eingesetzt wird.
In der flachen Liegeposition von MALTA spielt dies keine Rolle.

Sicherheitshinweise:

Uni-Flex-Schalen sowie MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen dürfen nicht ohne Aufsicht benutzt
werden.

Die korrekte Benutzung einer Uni-Flex-Schale mit der dafür vorgesehenen Lagerungshilfe erfordert
eine genaue und sorgfältige Einarbeitung.
Uni-Flex-Schalen dürfen ausschließlich nur zusammen mit MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen
angewendet werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Durchmesser-Einstellung einer Uni-Flex-Schale (4-fach einstellbar)
um eine Lagerungshilfe (MALTA- oder KRETA) so eingestellt ist, damit der Nutzer nicht zwischen Uni-
Uni-Flex-Schale und Lagerungshilfe geraten kann.
Bei Fixierung des Nutzers mit einer Becken- oder Tischpolsterrolle ist auf eine korrekte, weder zu
lockere noch zu feste Einstellung zu achten.
Das zulässige Körpergewicht eines Nutzers beträgt 150 kg.

Wozu und in welchem Zusammenhang Uni-Flex-Schalen eingesetzt werden.

Uni-Flex-Schalen stellen eine stabile und doch flexible Umrandung für alle MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen dar.

Die Uni-Flex-Schalengröße ist 4-fach einstellbar, je nach Aufbau der entsprechenden Sitz- oder Liegeposition.

Uni-Flex-Schalen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten von MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen.

Begründung:

Wurden MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen mit dem ihnen eigenen Stabilisierungs-Effekt bisher überwiegend bei Personen mit Hypotonie (herabgesetzter Muskeltonus) eingesetzt, so ermöglicht es eine zusätzlich eingesetzte Uni-Flex-Schale nun auch Menschen mit spastischen Bewegungsstörungen die Vorteile von MALTA- und KRETA zu nutzen, da die ursprünglich eingenommene Position jetzt, trotz einschließender Spastik, ähnlich wie bei einer Sitzschale durch die äußere Umrandung gehalten wird.

Unabhängig von dieser neuen Möglichkeit profitieren aber auch alle bisherigen Anwender von den Vorteilen einer Uni-Flex-Schalen-Umrandung da sie sowohl den Nutzer als auch die Lagerungshilfen mehr als bisher vor äußeren Einwirkungen schützt.

Jede Uni-Flex-Schale ist mit drei (zwei hinten, eine vorne) Zuggriffen versehen, sodass die komplette Einheit von 1-2 Personen, ggf. auch mit dem Nutzer gezogen werden kann

Standardausstattung einer Uni-Flex-Schale:

Zur Standardausstattung gehören Tragegriffe für den Transport (mit der ohne Nutzer), Schnallen zur Fixierung einer Becken-Polsterrolle oder eines keilförmigen Tischpolsters, sowie Fix-Lock-Stecker zur Größeneinstellung einer Uni-Flex-Schale.

Uni-Flex-Schalen sind für starke Beanspruchung aus robustem Polyester-Nylon Gewebe gefertigt. Sie sind mit einem robusten Boden und im hinteren hohen Bereich mit innenliegenden herausnehmbaren Schaumstoffplatten versehen. Sie können zum Transport zusammengerollt und mit einem Gurt fixiert platzsparend transportiert werden.

Zubehör:

Becken-Polsterrolle und keilförmiges Tischpolster.

Falls notwendig, kann das Becken des Nutzers durch ein Becken- bzw. Tischpolster zusätzlich zurückgehalten werden. Ggf. reicht allerdings bereits ein in der Lagerungshilfe richtig modulierter Abduktionskeil, um eine Positionierung trotz Streckspastik zu halten.

Reinigung:

Uni-Flex-Schalen können abgewaschen, desinfiziert oder bis 30 Grad gewaschen werden.

Die Schaumplatten im hinteren Bereich sind über einen Reißverschluss herausnehmbar.

Veränderungen und unsachgemäßer Gebrauch:

Bitte nehmen Sie keine Veränderungen unseren Uni-Flex-Schalen vor.

Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit unseren oben angegebenen Lagerungshilfen und nur in den von uns freigegebenen Kombinationen.

Wir übernehmen keine Garantie bei eigenmächtigen Veränderungen und nicht freigegebenen Kombinationsmöglichkeiten.

Wir übernehmen keine Garantie bei Anwendungen in Kombination mit Fremdprodukten.

Die Zuggriffe nicht als Tragegriffe verwenden.

Garantie:

1. Produkt-Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware

als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware.

2. Transportschäden/Schadensmeldungen sind uns und dem Spediteur (vom Fahrer schriftlich bestätigt) sofort zu melden.

3. Für sachgemäße Ausführung übernehmen wir eine Gewähr für alle innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile, die sodann nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt oder ausgebessert werden.

3. Durch Änderungen- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornimmt, wird die Gewährleistung aufgehoben.

4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung.

5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.

6. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.

Die nachstehenden Abb. zeigen derzeit noch die Verstell-Ausführung mit Klett/Flauschband.

Neu ist jedoch die Verstellung mittels Fix-Lock-Stecker, die hier noch nicht abgebildet sind.

Um eine höhere Liege- oder Sitzhöhe zu erreichen, können die Lagerungshilfen MALTA und KRETA ggf. auch mit Schaumstoffkeilen, Sofa-Kissen etc. unterlegt werden.

Engste Einstellung (Stufe 1):

Malta Standard Sitzposition

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


Enge Einstellung (Stufe 2):

Malta Standard, flach bis auf 120 cm Durchmesser ausgebreitet.

Kreta Standard, Sitzposition





Malta Groß 150 cm Durchmesser



Malta Groß 150 cm Durchmesser mit Beckenrolle



Weite Einstellung (Stufe 3)

Kreta Standard, hochkant, Liegeposition.



Malta Groß, 150 cm, Durchmesser. Stufe 3 bis auf 130 cm Durchmesser



Malta Standard 130 cm Durchm., Stufe 3 bis auf 130 cm Durchmesser



Kreta Standard, flach



Weiteste Einstellung (Stufe 4)

Kreta Groß, 200x100x27 cm,
hochkant



Kreta Groß, 200x100x27 cm,
flach



Malta Groß 150 cm Durchm.
Auf 150 cm Durchmesser ausge-
breitet.



Kreta Standard, flach,
(rechts u. links etwas Luft)



Kreta XL, 200x140x27 cm,
hochkant

Kreta XL, 200x140x27 cm,
flach ausgebreitet.

